

「New Radical-7」 Ver1.1.3.4i のお知らせ


平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。

現在お使いいただいております「New Radical-7」の Processor バージョン Ver1.1.3.4i がリリースされましたのでご連絡いたします。

1) Previous Profileの追加

Power on profileに「Previous Profile」が追加になりました。電源をOFF後でも、電源を入れた際にひとつ前の設定が立ち上がります。ドッキングステーション側のインターフェースアラーム設定は失われません。

※設定は「アクセス制御」から行います (パスワードは6274です)

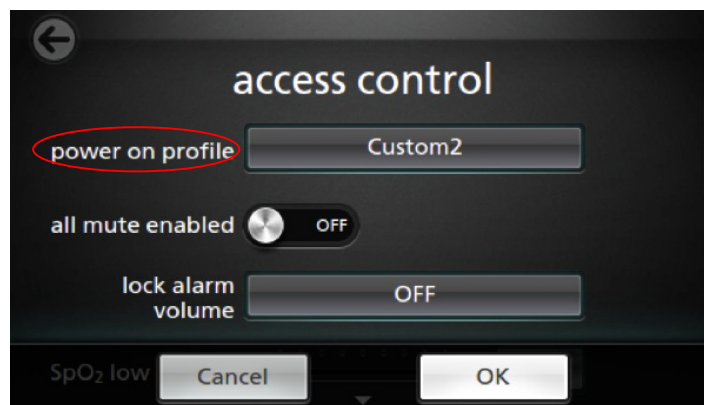

※電源供給についてお願い

ご使用の際には必ずAC電源に電源供給があること状態でご使用をお願いします。

2) Wi-Fiアイコンについて

SafetyNetをお使いの場合、Wi-Fiアイコンは、Radical-7がSafetyNetに接続されると、緑色に変わります。



3) デフォルト設定のお知らせ (Ver. 1.1.3.4より変更)

	成人 Adult Profile	新生児 Neonatal Profile	小児 Pediatric Profile
SpO2 平均化時間	8 秒	12秒	8秒
SpO2 上限	Off	99	Off
SpO2 下限	88	88	88
PR 上限	140	180	140
PR 下限	50	100	50
PI 上限	Off	Off	Off
PI 下限	0.3	0.3	0.3
PVI 上限	40	40	40
PVI 下限	5	5	5
SpOC 上限	25	25	25
SpOC 下限	10	10	10
RR 上限	30	60	30
RR 下限	6	15	6

出荷予定 : 2013 年 9 月

本件に関しましては担当営業またはマシモジャパン株式会社までお問い合わせください

マシモジャパン株式会社

TEL:03-3868-5201