

# モバイル端末から測定データを送信する方法


2023年7月現在

Android版

バージョン: 2.0.2.0  
OS要件: Android 7.0以上


## 履歴の送信

- ① Masimo Personal Healthアプリを開きます、画面左上の「≡」をタップします
- ② Historyをタップします
- ③ History画面の測定結果をタップします
- ④ 右上の「…」をタップし「Share as CSV」をタップすると共有方法が表示されます
- ⑤ 任意の共有方法をタップし送信してください

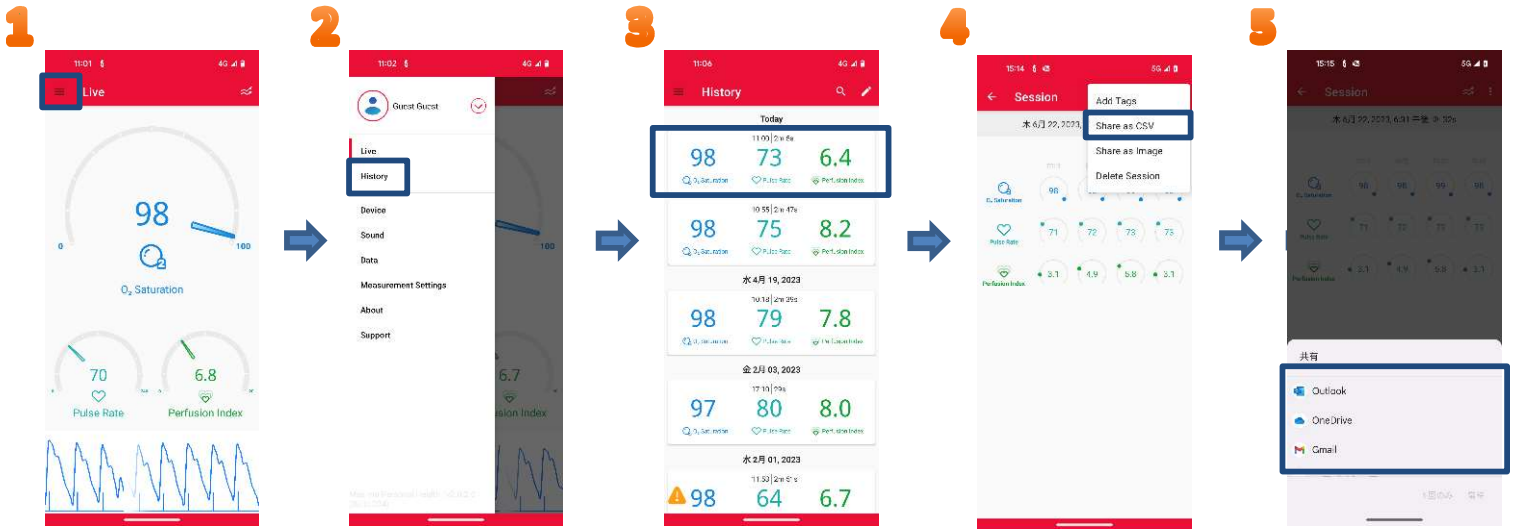

## 履歴のクリア

- ① 上記の画面のSession項目から「Delete Session」をタップで任意のセッションを削除できます。
- ※ またHistoryの画面から測定期間中の「min(最小)、avg(平均)、max(最大)、last(前回)」の履歴と右上の折れ線から「トレンド表示」に変更可能です。

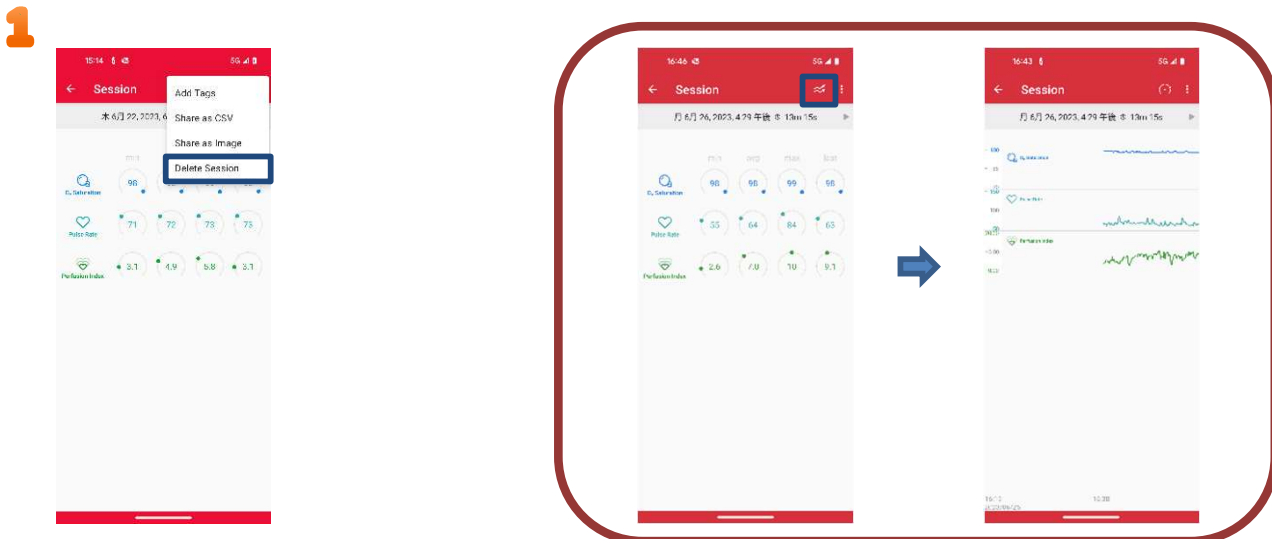

輸入・販売元:  
マシモジャパン株式会社  
〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー24階  
<http://www.masimo.co.jp>