

iOSデバイスから測定データを送信する方法


2023年7月現在

履歴の送信

バージョン: 2.4.30

OS要件: iOS13.0以降、iPadOS 13.0以降

- ① Masimo Personal Healthアプリを開き、画面左上の「≡」をタップします
- ② 「履歴」をタップします
- ③ 履歴画面の測定結果をタップします
- ④ 右上の「…」をタップします
- ⑤ 「CSVとして共有」をタップすると共有方法が表示されます
- ⑥ 任意の共有方法を選択してください

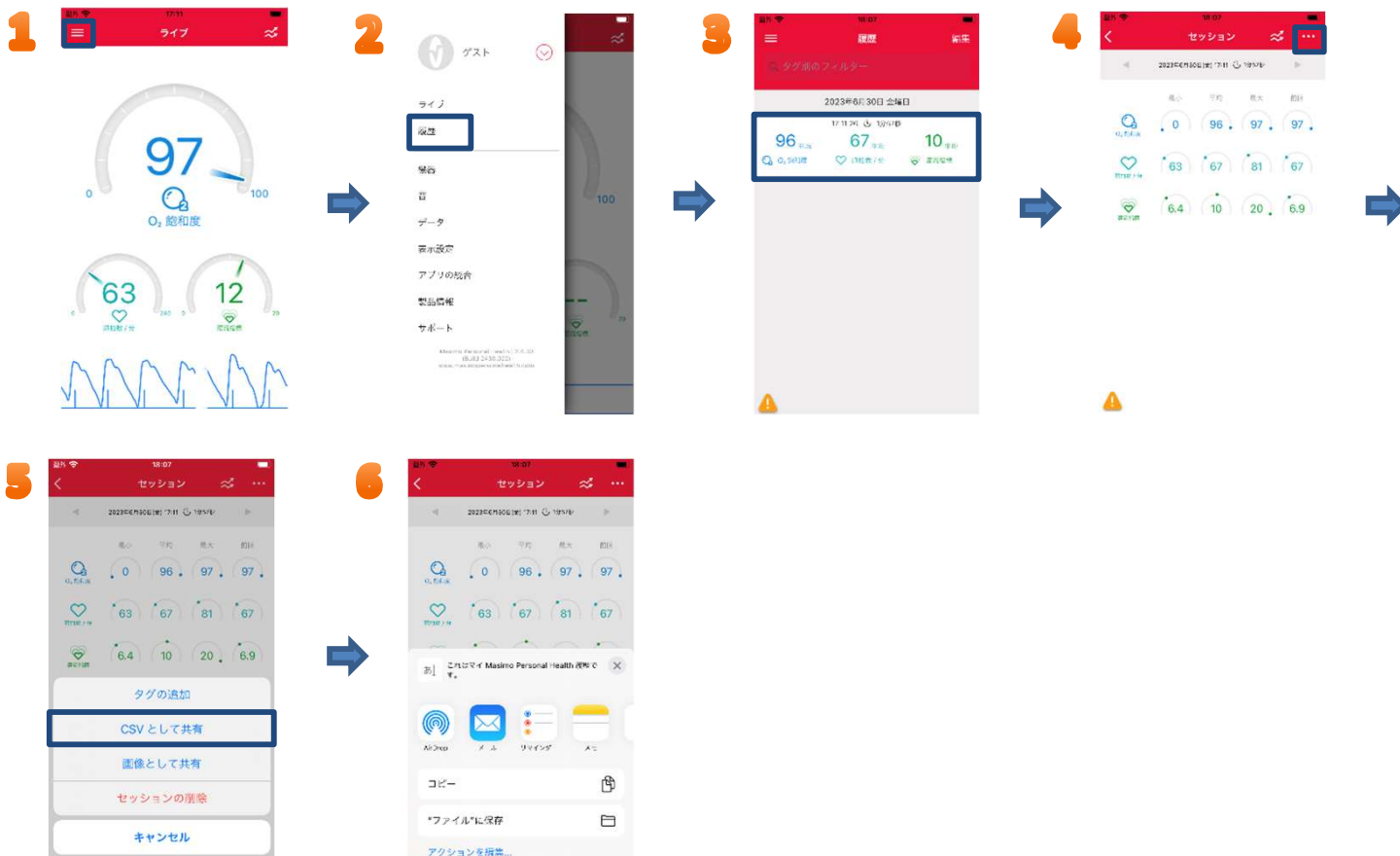

履歴のクリア

- ① 上記の④、⑤の手順でセッション項目から「**セッションの削除**」をタップするとセッション履歴の削除ができます
- ※ また履歴の画面から測定期間中の「最小、平均、最大、前回」の履歴と右上の折れ線マークから「トレンド表示」に変更可能です

