

「New Radical-7」 Ver1.1.1.3 のお知らせ

平素は格別のご高配を賜りありがとうございます。

現在お使いいただいております「New Radical-7」の Processor バージョン Ver1.1.1.3 がリリースされましたのでご連絡いたします。

1) スタンバイモードの追加

立ち上げ時間を短縮（16 秒～20 秒ほど）できるようスタンバイモードが追加されました。

電源を切られる場合には必ず「スタンバイモードでの OFF」か「電源 OFF」かを確認して操作してください。バッテリー消費を避けるためにも必ず AC 電源より電力の供給を行ってください。（スタンバイモードではバッテリーが稼働しております。）

■スタンバイモードの電源 OFF

3 秒～5 秒ほど、電源ボタンを押すと「ピッ」と 1 回音がし、画面が黒くなります。ただし、電源ボタンはブルーに点滅しています。

■電源 OFF

上記の「ピッ」と 1 回音がなってもそのまま押し続けてください。

10 秒長押ししますと、「ピピッ」と 2 回鳴り、画面が黒になると同時に「Powering Off」の文字が出ます。



2) テレンドビュー画面で詳細ビューの追加

画面にタップすると時刻や測定値の詳細を観ることができます



「○」は、アラームマークです

Cable disconnected, Sensor Off などのメッセージを観ることができます

画面にタップいただくと当該時刻の詳細を観ることができます

販売名: Masimo Rainbow SET パルス CO オキシメータ ラディカル 7

医療機器承認番号: 第 22200BZX00798000 号

商品番号: 9500 (ハンドヘルド) / 1310 (ドッキングステーション)